

multiSert™ pre-loaded enjeksiyon sistemi ile birlikte gelen Vivinex™ göz içi lensleri için uygulama adımları




multiSert™ enjektörün kullanıma hazır hale getirilebilmesi için izlenmesi gereken doğru aşamalar enjektör kutusu veya kapağı üzerinde ①, ② ve ③ numaraları ile belirtilmektedir.

Adım A



Enjektörü, tutma aparatından kavrayarak ambalajından çıkarın.

Adım B

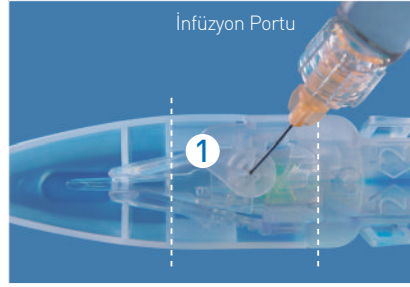


Sodyum hyalüronat içeren bir OVD'yi infüzyon portu üzerinden içeriye enjekte edin. Noktalı çizgilerle belirtilen alanı OVD ile doldurun ve OVD'nin optiğin tamamına ulaştığından emin olun.

Adım C




Serbest bırakma mandalına basın, kapağı yukarı çekerek enjektör kutusundan çıkarın.

Adım D

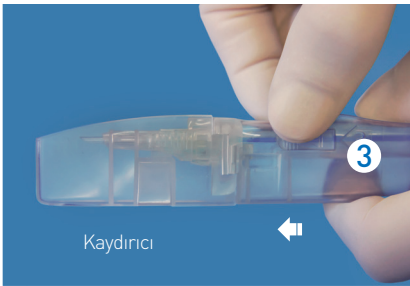


Enjektör gövdesini baş parmağınızla tutun ve kaydırıcıyı yukarı ya da aşağı baskı uygulamadan, yaklaşık 3 saniye boyunca, durana kadar dengeli bir şekilde yavaşça ileri itin. Kaydırıcı, enjektör kutusuna dayanıp durana kadar itmeye devam edin.

Adım E

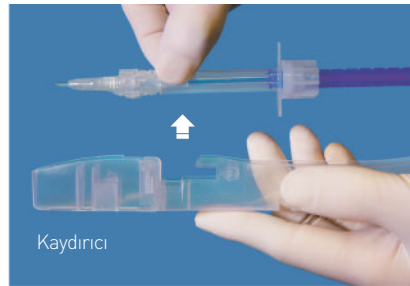

Enjektörü kutusundan çıkarın ve çıkarıldıktan sonra vakit kaybetmeden bir sonraki adıma geçin.

Adım F

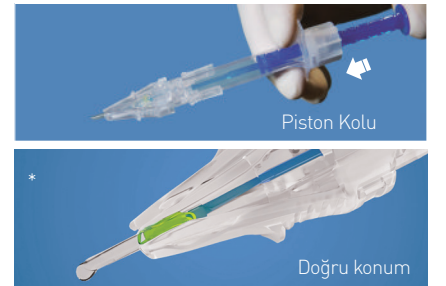

Piston kolunu, haptik katlanma durumu (*) görselde gösterilen konuma ulaşana kadar, yumuşak ve kesintisiz bir hareketle ileri itin ve durun. Pistonun ilerlemesi yaklaşık 5 saniye sürmelidir.

Doğru konumun teyidi:
Piston, optiğin arka kenarına doğru ilerlerken, arka haptiğin doğru şekilde katlandığından emin olun. Lens ilerlemeye devam ederken, ön ve arka haptiklerin doğru şekilde katlandığını ve piston ucunun optiğin kenarını merkezden uygun şekilde ittiğini kontrol edin.

4'ü 1 arada multiSert™, çoklu seçeneklerle eşsiz kontrol sunar.

Adım G




Uygulama Seçenekleri

Kapsüler kese içine yerleştirme




Enjektörü, yerleştirme kalkanını varsayılan konumundan hareket ettirmeden kullanın. İnsizyona yerleştirmeden önce, enjektör ucundaki keşiğin aşağı bakacak şekilde konumlandığından emin olun.

İnsizyon tüneli yoluyla yerleştirme

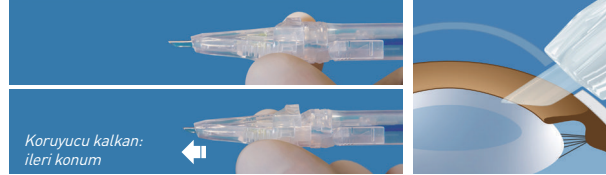

Enjektör gövdesini tutun ve koruyucu kalkanı son konuma gelip tıklama sesi duyulana kadar yavaşça ileri doğru kaydırın. İnsizyona yerleştirmeden önce, enjektör ucundaki keşiğin aşağı bakacak şekilde konumlandığından emin olun. Enjektörü, ileri konuma alınmış koruyucu kalkana kadar gözün içine yerleştirin.

multiSert™

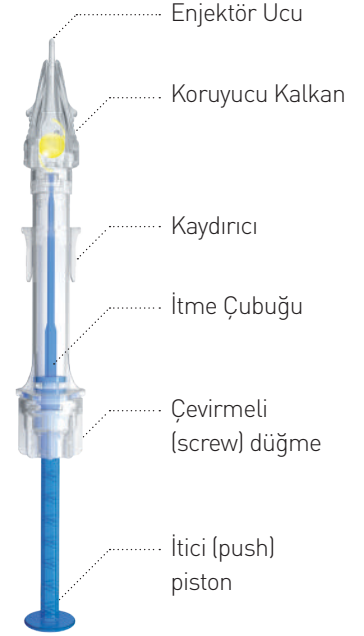

Tek elle itme ile implantasyon



Lensin kapsüler kese içerisine yerleştirilmesi için pistonu yavaşça ileri doğru itin.

Adım H



İmplantasyon Seçenekleri

İki elle çevirerek implantasyon



Lensin kapsüler kese içerisine yerleştirilmesi için enjektör düğmesini saat yönünde yavaşça döndürün.

! Her iki implantasyon seçeneği için de dikkat ediniz:

İleri itme işlemi sırasında pistonu geri çekmeyin veya düğmeyi ters yönde çevirmeyin. Enjektörün döndürülmesine gerek yoktur.



2024-08-16_HSOE_XC1-SP_XY1-SP_XY1A-SP_XY1-EM_XY1-G[T]_XY1-GP[T]_AG_TR 07.2025_Optisa_MultiSert_0003

Bu belgede yer alan bilgiler sağlık profesyonellerine yöneliktir. Lütfen ürünün amaçlanan kullanımı ile endikasyonlar ve kontrendikasyonların tam listesi için Kullanım Talimatlarına başvurunuz. HOYA Surgical Optics uluslararası websitesinde yer alan bazı ürünler, özellikler ve prosedürler ülkenizde onaylanmamış olabilir ve bu nedenle kullanımınıza sunulmamış olabilir. Tasarım ve teknik özellikler, sürekli teknik gelişmeler nedeniyle önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin ülkenizdeki kullanılabilirliği ile ilgili detaylı bilgi için lütfen bölgenizdeki temsilcimizle iletişime geçiniz. HOYA, Vivinex ve multiSert, HOYA Corporation veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. ©2024 HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. All rights reserved. ■ HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., 10 Biopolis Road #04-01/06, Chromos, Singapore 138670, SINGAPORE. ■ HOYA Surgical Optics GmbH | De-Saint-Exupery-Str. 10 | 60549 Frankfurt am Main | Germany | HotlineDE:Tel. +49 (0)800 664 2664 Fax +49 (0)800 774 2 774. hoyasurgicaloptics.com